

ÖSSZETEVŐK

Minden egyes 2 g-os kúp tartalmaz: 5,00 mg hialuronsav-nátriumsót, 1,00 mg tokoferil-acetátot, 1,00 mg retinil-palmitátot és félszintetikus glicerideket szükség szerint.

KÉSZÍTMÉNY TÍPUSA

Orvostechnikai eszköz

TULAJDONSÁGOK

A SANTES[®] hüvelykúp egy olyan, hialuronsavat (a bőr egyik fő alkotóeleme) tartalmazó készítmény, melynek helyi alkalmazása megvédi és javítja a hüvelynyálkahártya rugalmasságát és ezzel egy időben ideális körülményeket biztosít a gyógyulási folyamatokért felelős sejtek migrációjához és szaporodásához.

Nedvszívó képességének köszönhetően a hialuronsav védőgátat képez a külső környezettel szemben, elsősegítve a szövetregenerációs folyamatokat.

A SANTES[®] hüvelykúpban jelenlévő hialuronsav jellemzője, hogy alacsony molekulatömegű, ez elősegíti a magas biológiai hasznosíthatóságát és hatékonyságát, meggyorsítva így a hüvely nyálkahártyájának hegesedési folyamatait és a sebgyógyulást. A retinil-palmitáttal (A-vitamin) és a tokoferil-acetáttal (E-vitamin) társulva antioxidáns hatást gyakorol a szabad gyökök ellen, megvédve így a hüvelyi környezetet.

KLINIKAI INFORMÁCIÓK

JAVALLAT

Hüvelyi bántalmak kezelésére és megelőzésére, beleértve a sérüléseket, ektópiákat és a hüvelynyálkahártya más eltéréseit, amelyeket fizikai kezelések is okozhattak (úgy mint: DTC, lézeres kezelés, krioterápia, radioterápia). Nyugtató és nedvességnövelő kezelés, főleg a menopauzás páciensek kezelésére.

ELLENJAVALLAT

Összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység.

MELLÉKHATÁSOK

A mai napig nem észleltek mellékhatást. Bármilyen mellékhatás esetén, amelyről gyanítható, hogy a készítmény használata okozta, kérjük, értesítse kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét.

GÉPJÁRMŰVEZETŐI, VAGY GÉPKEZELŐI ALKALMASSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA

Nem észleltek semmi olyan hatását, ami a gépjárművezetői, vagy a gépek kezeléséhez szükséges alkalmasságot befolyásolná.

ALKALMAZÁS MÓDJA

1. A csomagolás felbontása előtt alaposan mosson kezét.
2. Vegyen ki a buborékcsoomagolásból egy becsomagolt kúpot, ügyelve rá, hogy a többi csomagolását ne sértse fel.
3. Vegye ki a kúpot a fóliából.
4. Óvatosan helyezze fel a kúpot a hüvelybe, a lehető legmélyebbre, elkerülve ezzel a termék véletlenszerű visszafolyását.

ADAGOLÁS

Esténként egy kúp, egymást követő 14 napon keresztül. Szükség esetén a kezelés megismételhető. A fizikai kezelések okozta hüvelybántalmak esetén alkalmazza a készítményt a kezelés első napjától kezdve.

FIGYELMEZTETÉSEK

Minden termék hosszabb ideig tartó helyi használata érzékenységi reakciókat okozhat, ez esetben függessze fel a kezelést, és beszéljen kezelőorvosával a megfelelő kezelés megállapításának az érdekében. Speciális nőgyógyászati kezelések, vagy vizsgálatok esetén a kezelést az azt megelőző napon fel kell függeszteni. A terméket kizárólag hüvelyi úton szabad alkalmazni. Rendeltetészerű használata esetén nem észleltek túladagolás miatti mellékhatásokat. A terhesség ideje alatti alkalmazása csak tényleges szükséglet és orvosi felügyelet mellett megengedett. Ne alkalmazza a készítményt, ha annak bármely összetevőjére allergiás. Ne alkalmazza a készítményt a csomagoláson feltüntetett lejáratú időt követően. Ne alkalmazza a készítményt, amennyiben a csomagolása és/vagy a buborékfólia sérült. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne nyelje le.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Hőforrásoktól távol, fénytől védve 0 és 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

CSOMAGOLÁS

14 db 2 g-os kúp

A használati utasítás legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. 10. 03.

 Gyártó: Lo.Li. Pharma S.r.l. - Via dei Luxardo, 33 - 00156 Róma, Olaszország

 Forgalmazó: Exeltis Magyarország Kft., 1011 Budapest, Fő u. 14-18., Magyarország

Lo.Li.
Pharma
INTERNATIONAL

CE 0373